



АТЛЕТТ

Ваш путь правильного движения

**КАТАЛОГ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
И МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА**



2012

Компания ООО «АТЛЕТТ» - динамично развивающаяся российская компания с мощной современной производственной базой на Тайване. Мы занимаемся научными разработками ортопедических изделий совместно с ведущими врачами-реабилитологами, травматологами-ортопедами и нейрохирургами, а также производством и реализацией широкого спектра ортопедической продукции и изделий медицинского назначения.

В сотрудничестве с профессионалами мы стремимся к обеспечению своих клиентов продукцией безупречного качества и по приемлемым ценам, чтобы вместе помочь людям жить полноценной здоровой жизнью. Продукция ООО «АТЛЕТТ» изготавливается с использованием современных технологий из высококачественных гипоаллергенных, легких и прочных материалов, что обеспечивает ее долговечность и удобство в использовании. Мы производим корсеты и бандажи разных модификаций и размеров для всех отделов позвоночника, взрослые и детские.

Качество нашей продукции подтверждено международными и российскими сертификатами. Изделия ООО «АТЛЕТТ» зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Наша продукция создана для поддержания здоровья, которое необходимо каждому человеку, независимо от его возраста.

С уважением,
Генеральный директор



Ахметов М.Р.



СОДЕРЖАНИЕ

ФИКСАТОРЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА:

	стр.
Бандаж «Атлетт» мягкий поддерживающий для шейных позвонков (взрослый/детский) АШВ-1, АШД-1	4
Бандаж «Атлетт» жесткий поддерживающий для шейных позвонков АШ-3	4

ФИКСАТОРЫ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА:

Корсет «Атлетт» для спины производственный полужесткий (взрослый/детский) АГП-2, АГПД-2	6
Корсет «Атлетт» для спины производственный полужесткий поясничный усиленный АГПУ-2	6
Корсет «Атлетт» для спины производственный жесткий АГП-3	8

ФИКСАТОРЫ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА:

Корсет «Атлетт» полужесткий поясничный АП-2	8
Корсет «Атлетт» полужесткий поясничный усиленный АПУ-2	10

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОЯСА:

Пояс «Атлетт» поддерживающий (хирургический) (узкий, 23 см/ широкий, 31 см) АП-1-23, АП-1-31	10
---	----

ФИКСАТОРЫ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА:

Корсет «Атлетт» полужесткий пояснично-крестцовый АПК-2	12
Корсет «Атлетт» жесткий пояснично-крестцовый АПК-3	12

Бандаж «АТЛЕТТ» мягкий поддерживающий для шейных позвонков (взрослый/детский) **АШВ-1, АШД-1**

Результат применения:

- Бандаж ограничивает вращательные, сгибательные и разгибательные движения шеи.
- Тепловое воздействие способствует улучшению кровообращения, ускорению восстановления и сокращению сроков выздоровления

Изготовлен из высококачественного поролона, анатомическая форма, застежка-липучка текстильная, сверху защищен чехлом из хлопчатобумажной ткани

Показания:

- остеохондроз шейного отдела позвоночника
- болевой синдром в области шеи
- комплексное лечение головной боли, головокружения
- состояния после травм и операций на шейном отделе
- симптомы нарушения кровотока по позвоночным артериям
- нарушения тонуса мышц

Цвет: бежевый, черный.

Размеры: подбираются измерением окружности шеи и высоты (от подбородка до яремной ямки, см): взрослый (АШВ-1-8 (7,62 см), АШВ-1-9 (8,89 см), АШВ-1-10 (10,16 см), АШВ-1-11 (11,20 см)); детский (АШД-1-3 (3,50 см), АШД-1-4(4,00 см), АШД-1-5 (5,08см), АШД-1-6 (6,35 см), АШД-1-7(7,00см).

ФИКСАТОРЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Бандаж «АТЛЕТТ» жесткий поддерживающий для шейных позвонков **АШ-3**

Результат применения:

- Бандаж фиксирует и стабилизирует шейный отдел позвоночника
- Разгружает связочный аппарат и мышцы шейного отдела
- Создает жесткую опору голове

Изготовлен из высокотехнологичного материала по гипсовому позитиву человека, фиксируется ремнями с застежкой-липучкой текстильной, отверстие в области щитовидного хряща позволяет контролировать состояние трахеостомы.

Показания:

- травмы шейного отдела позвоночника
- на этапе транспортной эвакуации
- повышенная подвижности шейных позвонков
- смещение шейных позвонков
- остеопороз
- остеомиелит
- онкологические заболевания
- остеохондроз
- послеоперационный период на шейном отделе позвоночника

Цвет: бежевый.

Размеры: S, M, L, XL. (подбираются так же, как и бандажи мягкие).



Арт.	Размер(см)	Окружность(см)
АШВ-1-8	7,62	30-45
АШВ-1-9	8,89	30-45
АШВ-1-10	10,16	30-45
АШВ-1-11	11,20	30-45



Арт.	Размер(см)	Окружность(см)
АШД-1-3	3,5	до 23
АШД-1-4	4	до 25
АШД-1-5	5	до 25



Арт.	Размер(см)	Окружность(см)
АШД-1-6 (6,35 см)	6	20-32
АШД-1-7 (7,00 см)	7	20-32



Арт.	АШ-3			
Окр. шеи (см)	25-33	33-41	41-46	46-48
Высота воротника (см)	5,7	5,7	5,7	5,7
	8,3	8,3	8,3	8,3
	10,8	10,8	10,8	10,8
	13,3	13,3	13,3	13,3
Размер	S	M	L	XL

Корсет «АТЛЕТТ» для спины производственный полужесткий (взрослый/детский) АГП-2, АГПД-2

Результат применения:

- улучшает осанку, не ограничивая свободы движений;
- реклонация и разгрузка верхнее- и средне- грудного отделов с укреплением мышечного корсета тонуса мышц.

Показания:

- формирование правильной осанки у взрослых и детей;
- искривления грудного отдела позвоночника;
- остеохондроз грудного отдела позвоночника, остеопороз;
- профилактика сутулости при нагрузке на позвоночник (при сидячей работе);
- реабилитация после травм и операций грудного отдела позвоночника;
- грыжи межпозвонковых дисков грудного отдела.

Спинка изготовлена из неэластичного материала, что не препятствует мышечной активности. Корсет фиксируется на животе застежкой-липучкой текстильной. Имеется 2 моделируемых ребра жесткости, расположенных паравертебрально. Разворот плеч поддерживают нерастяжимые лямки с застежками-липучками.

Цвет: бежевый, черный.

Размеры АГП-2: S, S1, M, M1, L, L1, XL, XL1, XXL, XXL1.

Размеры АГПД-2: S, M, L

Корсет «АТЛЕТТ» для спины производственный полужесткий поясничный усиленный АГПУ-2

Результат применения:

- улучшает осанку, не ограничивая свободы движений;
- реклинация и разгрузка верхнее- и средне- грудного отделов с укреплением мышечного корсета, тонуса мышц;
- снятие мышечного напряжения и, соответственно, устранение болевого синдрома

Показания:

- нарушения осанки (сутулость), сопровождающиеся болевым синдромом в поясничной области;
- искривления грудного отдела позвоночника(кифозы, сколиозы I-II степени);
- профилактика переломов на фоне остеопороза;
- реабилитация после операций и травм позвоночника;
- множественные грыжи межпозвонковых дисков грудного отдела.

Спинка изготовлена из неэластичного материала, что не препятствует мышечной активности. Корсет фиксируется на животе застежкой-липучкой текстильной. Имеются 2 моделируемых ребра жесткости, расположенных паравертебрально. Разворот плеч поддерживают нерастяжимые лямки с застежками-липучками. В конструкции предусмотрены ленты натяжения для снятия мышечного напряжения и, соответственно, устранения болевого синдрома.

Цвет: бежевый, черный.

Размеры: S, S1, M, M1, L, L1.XL, XL1, XXL,XXL1.



Арт.	Размер	Рост, сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АГП-2	S	150-160 (60-75)
	S1	160-170 (60-75)
	M	160-170 (70-85)
	M1	170-180 (70-85)
	L	170-180 (80-95)
	L1	180-190 (80-95)
	XL	180-190 (90-110)
	XL1	190-200 (90-110)
	XXL	200-210 (110-130)
	XXL1	200-210 (110-130)

Арт.	Размер	Рост, сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АГПД-2	S	100-120 (45-52)
	M	120-140 (52-58)
	L	140-160 (58-65)

Арт.	Размер	Рост, сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АГПУ-2	S	150-160 (60-75)
	S1	160-170 (60-75)
	M	160-170 (70-85)
	M1	170-180 (70-85)
	L	170-180 (80-95)
	L1	180-190 (80-95)
	XL	180-190 (90-110)
	XL1	190-200 (90-110)
	XXL	200-210 (110-130)
	XXL1	200-210 (110-130)

ФИКСАТОРЫ ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

Корсет «АТЛЕТТ» для спины производственный жесткий АГП-3

Результат применения:

-гиперэкстензия, реклинация и разгрузка грудопоясничного отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины.

Показания:

- иммобилизация после хирургического вмешательства;
- грыжи межпозвонковых дисков грудного и поясничного отделов позвоночника;
- переломы позвонков в грудопоясничном отделе;
- спондилолистезы с угрозой травм корешков спинного мозга;
- нестабильность в грудопоясничном отделе позвоночника по различным причинам.

Изготовлен из легких и прочных материалов. Внутри жесткого корсета находится мягкая подкладка. Фиксирующие ремни снабжены застежкой-липучкой текстильной.

Цвет: серый.

Размеры: S, M, L, XL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

ФИКСАТОРЫ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ПОЛУЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

Корсет «АТЛЕТТ» полужесткий поясничный АП-2

Результат применения:

- гиперэкстензия, реклинация и разгрузка поясничного отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины;
- дозированная фиксация и разгрузка позвоночника;
- при физических нагрузках оказывает стабилизирующее действие на поясничный отдел позвоночника, стимулирующее действие на мышцы спины.

Показания:

- болевого синдром на фоне напряжения мышц и мышечного дисбаланса смещений позвонков (спондилолистез I степени);
- функциональная терапия при люмбагии и ишалгии;
- профилактика травм и заболеваний при работе с тяжестями.

Изготовлен из эластичного сетчатого материала. Корсет имеет две дополнительные стяжки, снабженные застежкой-липучкой текстильной, для усиления фиксации. Расположение 4-х ребер жесткости снимает мышечное напряжение и в результате уменьшает боль. Ширина изделия 20 см.

Цвет: бежевый, черный.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).



Арт.	Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АГП-3	S	75-90
	M	90-105
	L	105-120
	XL	120-135



Арт.	Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АП-2	XS	до 70
	S	70-85
	M	85-97
	L	97-105
	XL	105-115
	XXL	Более 115



Корсет «АТЛЕТТ» полужесткий поясничный усиленный АПУ-2**Результат применения:**

- гиперэкстензия, реклинация и разгрузка поясничного отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины;
- дозированная фиксация и разгрузка позвоночника;
- при физических нагрузках оказывает стабилизирующее действие на поясничный отдел позвоночника, стимулирующее действие на мышцы спины.
- стабилизирует суставно-связочный аппарат поясничного отдела.

Показания:

- радикулит;
- корешковый синдром;
- локализованный остеохондроз;
- спондилоартрозы и спондилиты;
- межпозвоночные грыжи;
- смещение позвонков;
- функциональная терапия при болях в пояснице.

Изготовлен из эластичного сетчатого материала. Корсет имеет две дополнительные стяжки, снабженные застежкой-липучкой текстильной, для усиления фиксации. Расположение 6-ти ребер жесткости снимает мышечное напряжение и в результате уменьшает боль. Ширина изделия 25 см. Возможно ношение корсета стандартным способом или с реклинирующим эффектом.

Цвет: бежевый, черный.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОЯСА:**Пояс «АТЛЕТТ» поддерживающий (хирургический)
(узкий, 23 см/ широкий (31 см) АП-1-23, АП-1-31****Результат применения:**

- умеренная поддержка, защита от охлаждения мышц спины
- ранняя мобилизация после операций на органах брюшной полости и брюшной стенке
- профилактика образования грыж брюшной стенки

Показания:

- не осложненные невропатии миопатии поясницы
- радикулиты и радикулозы
- фиксирует переднюю и боковую брюшные стенки
- реабилитация после операций на брюшную стенку
- слабость брюшной стенки

Изготовлен из высокотехнологичных гипоаллергенных материалов.
АП-1-23 снабжен двойным клапаном для лучшего прилегания пояса к телу.

Цвет: белый.

Размеры: S, M, L, XL, XXL (подбираются измерением окружности талии, см).



Арт.	Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АПУ-2	XS	до 70
	S	70-85
	M	85-97
	L	97-105
	XL	105-115
	XXL	Более 115



Арт.	Размер	Окружность талии(см)
АП-1-23	S	до 85
	M	85-95
	L	95-105
	XL	105-120
	XXL	120-135



Арт.	Размер	Окружность талии(см)
АП-1-31	S	до 85
	M	85-95
	L	95-105
	XL	105-120
	XXL	120-135

ФИКСАТОРЫ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ПОЛУЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

Корсет «АТЛЕТТ» полужесткий пояснично-крестцовый АПК-2

Результат применения:

- гиперэкстензия, реклинация и разгрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины
- дозированная фиксация и разгрузка позвоночника
- при физических нагрузках оказывает стабилизирующее действие на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, стимулирующее действие на мышцы спины

Показания:

- радикулит, остеохондроз, спондилоартроз, спондилит, спондилолистез, протрузии межпозвонковых дисков
- реабилитация после травм и операций
- функциональная терапия при болях в пояснице и нижней части

Изготовлен из прочного высококачественного материала, имеющего воздухопроницаемые свойства. Корсет имеет две дополнительные стяжки, снабженные застежкой-липучкой текстильной, для усиления фиксации. Задняя стенка включает 4 ребра жесткости и захватывает крестцовый отдел.

Цвет: бежевый, черный.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).

ФИКСАТОРЫ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

корсет «АТЛЕТТ» жесткий пояснично-крестцовый АПК-3

Результат применения:

- гиперэкстензия, реклинация и разгрузка пояснично-крестцового отдела позвоночника с компенсацией функции мышц спины.

Показания:

- иммобилизация после хирургического вмешательства;
- грыжи межпозвонковых дисков поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника;
- переломы позвонков в поясничном отделе;
- спондилолистезы с угрозой травм корешков спинного мозга;
- нестабильность в поясничном отделе позвоночника по различным причинам.

Изготовлен из легких и прочных материалов. Внутри жесткого корсета находится мягкая подкладка. Фиксирующие ремни снабжены застежкой-липучкой текстильной.

Цвет: серый.

Размеры: S, M, L, XL (сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см).



Арт.	Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АПК-2	S	до 70
	M	70-85
	L	85-97
	XL	105-115
	XXL	Более 115



Арт.	Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам (см)
АПК-3	S	75-90
	M	90-105
	L	105-120
	XL	120-135

для заметок

Blank lined area for notes.



ООО «Атлетт»

420126, Республика Татарстан, г. Казань, пр-т Ф.Амирхана, 12д-1

Тел/факс. (843) 515-12-95

www.atlett.com